

Sérum physiologique NaCl 500 ml



+ d'info

<https://www.medisafe.fr/serum-physiologique-500ml-241100.html>

Description :

- Avec une contenance de 500 mL, ce flacon est parfait pour un usage prolongé, évitant les achats fréquents et répondant aux besoins des familles nombreuses et des professionnels de santé.
- Son grand volume permet d'effectuer plusieurs utilisations, qu'il s'agisse de nettoyer les plaies, d'irriguer les yeux, ou de préparer des solutions.
- Une solution stérile, apyrogène et conforme aux normes médicales, indispensable dans les cabinets médicaux, écoles, et crèches.
- Flacon anti-gouttes et bouchon à bague d'invulnérabilité, garantissant une utilisation propre et sécurisée en clinique ou à domicile.
- Flacon en polypropylène recyclable, léger et résistant, pour un usage facile et un stockage prolongé.
- Graduation gravée pour un dosage précis et économique, évitant tout gaspillage.
- **Conductivité** : $\leq 5,0 \mu\text{S/cm}$ à 25 °C.

Caractéristiques techniques :

Volume	500 ml
Texture	Liquide
Stérile	Oui
Recyclable ou biodégradable	Oui
Conditionnement de vente	1 bouteille
Prêt à l'emploi	Oui
Sans colorant	Oui
Sans conservateur	Oui
Durée avant péremption	2 ans

Caractéristiques réglementaires :

T° min stockage	15°C
T° max stockage	25°C
Marquage CE	Oui
Dispositif médical	Classe IIa

Mode d'emploi :

- Vérifiez l'intégrité : Assurez-vous que le flacon est intact et sans fuite avant utilisation.
- Ouvrez le bouchon en vérifiant la bague d'inviolabilité.
- Versez ou utilisez directement selon vos besoins spécifiques.
- Post-utilisation : Une fois ouvert, utilisez immédiatement pour garantir la stérilité.

Produit à usage unique : ne pas réutiliser après ouverture.

Conserver à température ambiante (15 °C à 25 °C).

Après ouverture, la stérilité n'est plus garantie.

Éviter tout contact avec des substances non stériles pour maintenir la qualité.